



PONTAS


ULTRASSÔNICAS E BROCAS

Experimente a Inovação

CATÁLOGO 2025

Clinical PLUS

| **DentSurg** PRO

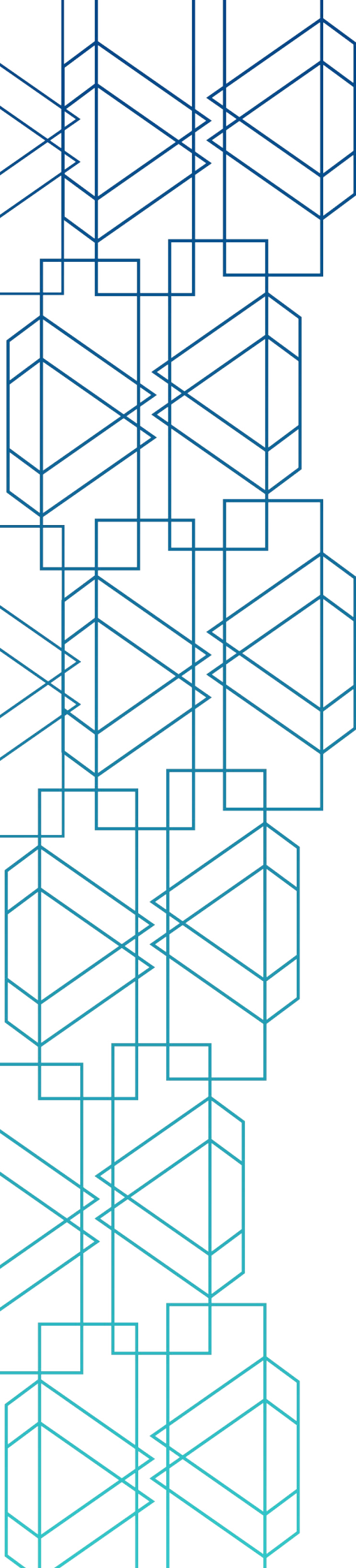


SUMÁRIO

01	DIAMANTE CVD	04
02	DIAMANTE DLC	05
03	ENDODONTIA	07
04	PERIODONTIA	17
05	DENTÍSTICA	25
06	PRÓTESE	33
07	CIRURGIA	41
08	ÍNDICE	48


Diamante CVD

O Diamante CVD (processo conhecido como Chemical Vapor Deposition) da CVDentus® é uma tecnologia 100% brasileira, patenteada em todo o mundo. Possui dureza próxima à do diamante natural e é 30x mais duro que o esmalte do dente (95GPa VS. esmalte dentário 3,3GPa). Sendo uma pedra única e com rugosidades controladas, além da alta durabilidade as suas características possibilitam também procedimentos exclusivos e qualidades de preparo diferenciadas.

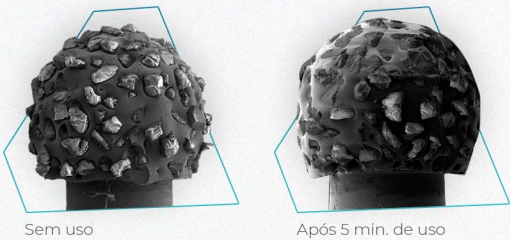

PONTA CONVENCIONAL DIAMANTADA

- Pó de Diamante natural ou sintético
- Menor durabilidade
- Superfície com arestas irregulares
- Acabamento desuniforme
- Gera resíduos
- Contato direto com metal

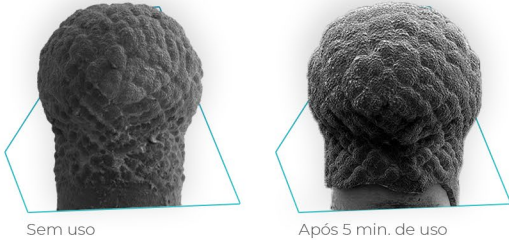

PONTA DE DIAMANTE CVDENTUS®

- Pedra única de Diamante
- Alta durabilidade (30x maior)
- Superfície homogênea, isenta de arestas
- Acabamento uniforme
- Contato somente com diamante (biologicamente compatível)

Além da **superfície homogênea**, a tecnologia da CVDentus® permite a granulação controlada no processo produtivo do diamante, o que possibilita ao profissional realizar procedimentos desde o desgaste até o pré-polimento. Existem **cinco tipos diferentes de rugosidade** para atender as mais diversas necessidades: Extremo Ultra Fino, Ultra Fino, Fino, Rugoso e Extremo Rugoso.

EXTREMO ULTRA FINO - UX

Ideal para acabamentos ou etapa anterior ao polimento.

ULTRA FINO - U

Realiza o refinamento do preparo.

FINO - F

Ideal para desgates finos.

RUGOSO


Realiza o desgaste controlado.

EXTREMO RUGOSO - XR


Ideal para um alto desgaste.

Diamante DLC

Recobrimento conhecido como **Diamond Like Carbon** - DLC - da CVDentus®, é uma tecnologia patenteada e é aplicado em forma de filme nas pontas da linha cirúrgica promovendo **resistência ao desgaste, redução do coeficiente de atrito** e ainda possui o **efeito bactericida**. Aplicado em liga de titânio, um material nobre utilizado em aeronaves e satélites, possui características que o torna ideal para fabricação das pontas ultrassônicas cirúrgicas. Possui **baixo peso e excelentes propriedades físico químicas tais como elevada resistência mecânica, resistência à altas temperaturas e também à corrosão química**.

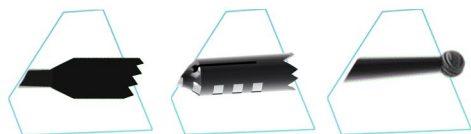


Pontas com formatos variados, espessuras da parte ativa desenvolvidas a partir de 0,28mm, diâmetros que garantem precisão sem desgastes desnecessários, permitindo procedimentos cirúrgicos de alta performance e segurança.

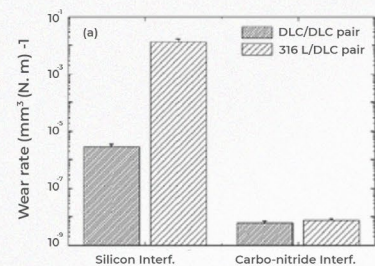


DLC POSSUI UM COEFICIENTE DE ATRITO EXTREMAMENTE BAIXO, PRÓXIMO AO TEFLON, GARANTINDO MENOS DANOS AO TECIDO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR

Comparative study of the tribological behavior under hybrid lubrication of diamond-like carbon films with different adhesion interfaces
R.P.C Costa , D.A. Lima-Oliveira , F.R. Marciano , A.O. Lobo , E.J. Corat , V.J. Trava-Airoldi

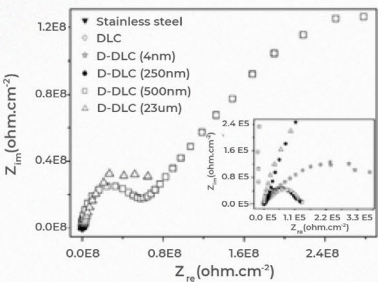

DLC AUMENTA A VIDA ÚTIL DA PEÇA PROTEGENDO-O DE CORROSÃO ELETROQUÍMICA.

Crystalline diamond particles into diamond-like carbon films: The influence of the particle sizes on the electrochemical corrosion resistance
F.R. Marciano*, E.C. Almeida, D.A. Lima-Oliveira, E.J. Corat , V.J. Trava-Airoldi*

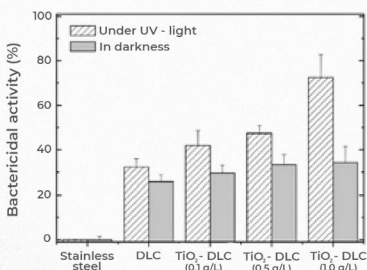

DLC "ADITIVADO" COM NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) REDUZ A ATIVIDADE BACTERIANA EM ATÉ 75%

Anticbacterial activity of DLS films containing TiO₂ nanoparticles
F.R. Marciano*, D.A. Lima-Oliveira, N.S. da-Silva, A.V. Diniz, E.J. Corat , V.J. Trava - Airoldi

ENDODONTIA




CÂMARA PULPAR

Acesso




Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

- Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar

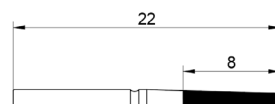



Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

- Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar

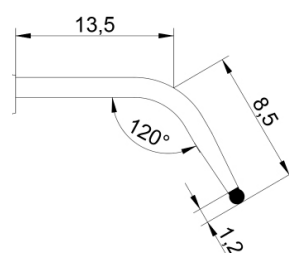

Cod. **R2**
Ø 1,2mm



- Desgaste para o acesso à câmara pulpar

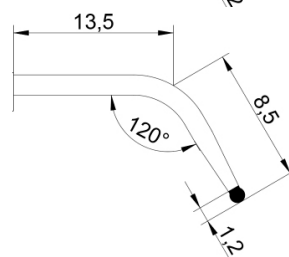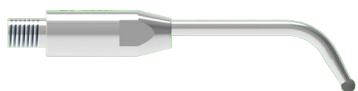

Cod. **R4**
Ø 1,6mm


- Desgaste para o acesso à câmara pulpar

Preparo da câmara pulpar

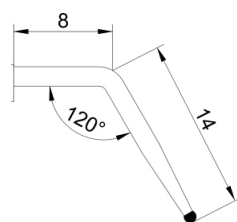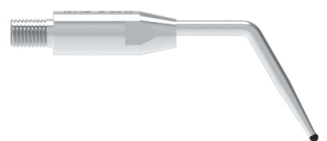

Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm



- Realiza o desgaste e permite a remoção do teto e da dentina

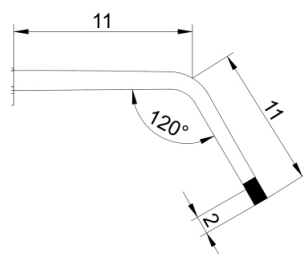



Cod. **C22-E**
Ø 1,0mm

- Realiza o desgastte e permite a remoção do teto e da dentina

Remoção de nódulo pulpar

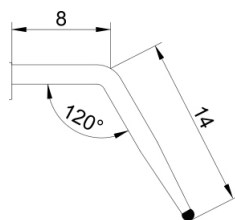
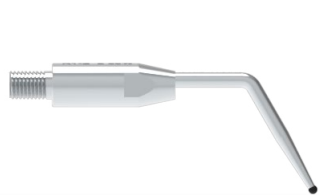


Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

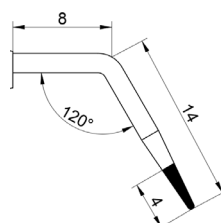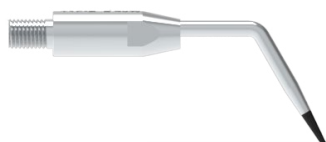

Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm



Desgaste fino das paredes

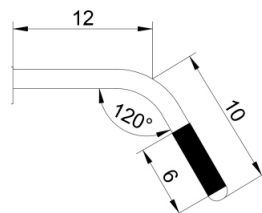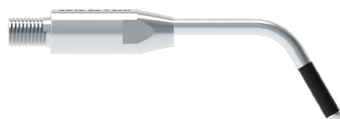


Cod. **CR4F-ST**
Ø 1,6mm

· Não desgasta o asso-
alho por não possuir
diamante no topo

Localização do canal

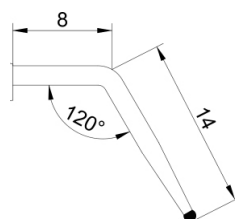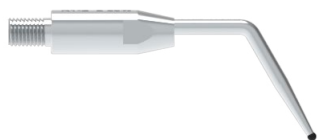


Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

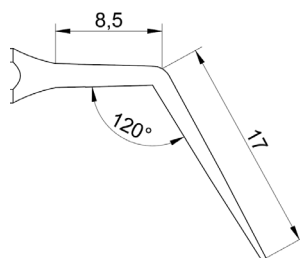

Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Inclusive MV2

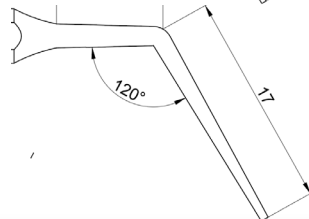


Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm


Esses 2 insertos são muito interessantes, a TR1F-ST trabalha na região de ístimo e refina a entrada do canal, e a CR4F-ST realiza acabamento e alisamento das paredes da câmara pulpar, **garantindo segurança dos procedimentos e extrema qualidade nos preparos.**

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**
Especialista em Endodontia.

Remoção do trigono da dentina


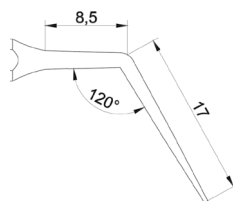


Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

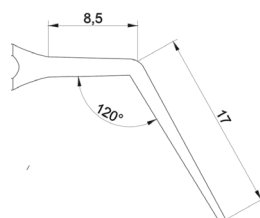


Cod. **TIT-E**
Ø 0,65mm

Desobstrução do canal

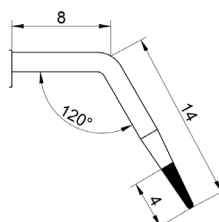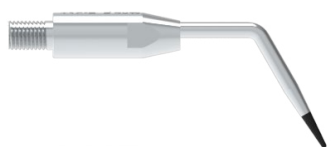

Cod. **TIF-E**
Ø 0,5mm

Refinamento na entrada do canal


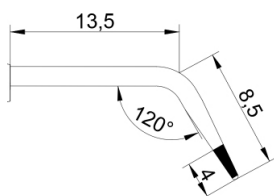


Cod. **TRIF-ST**
Ø 1,0mm

· Não possui diamante no topo



TERÇO MÉDIO

Istimo

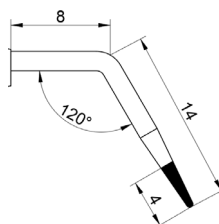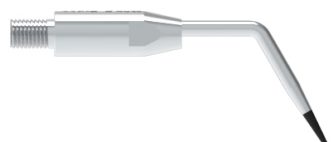

Cod. **TIF-E**
Ø 0,5mm


· Limpeza da área do istmo

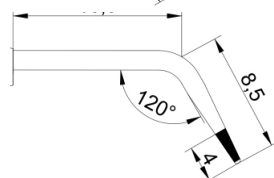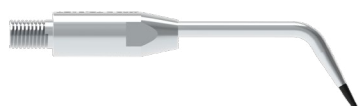

Cod. **TRIF-ST**
Ø 1,0mm


· Não possui diamante no topo, realizando a limpeza apenas na lateral da região do istmo

Guta-percha

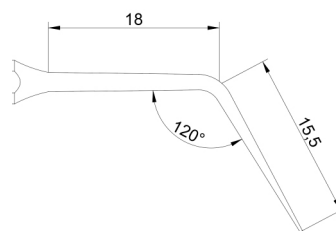


Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Corte e termoplastificação da gutta-percha

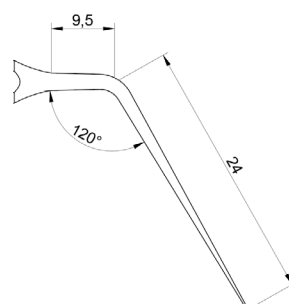

Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm


· Corte e termoplastificação da gutta-percha

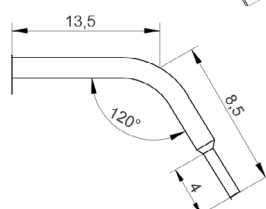

Cod. **CR2T-E**
Ø 1,2mm


· Corte e compactação da gutta-percha

Limpeza de canais achatados

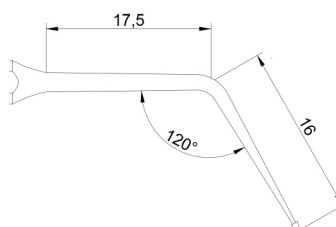


Cod. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpeza de áreas de difícil acesso

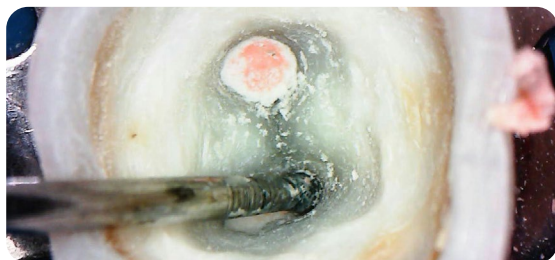


Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
Corte e termoplastificação da gutta-percha
Cod. C2T-E e R1-E


Remoção de instrumento fraturado

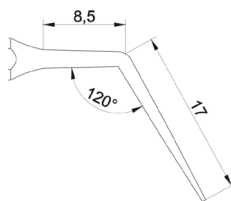


Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

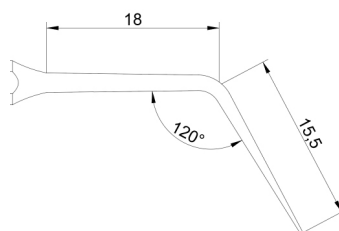

Cod. **TOT-E1**
Ø 0,3mm

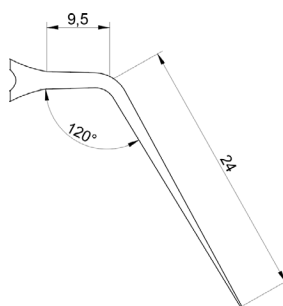

Cod. **TOT-E2**
Ø 0,3mm

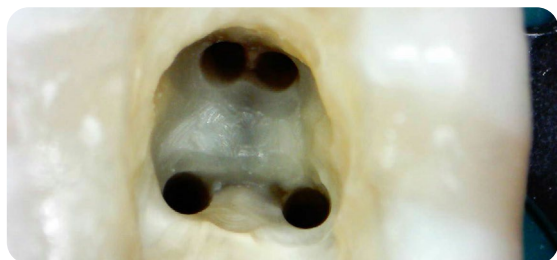

Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
Limpeza da câmara pulpar e corte e termoplastificação da Guta-Percha
Cod. TOT-E1, TOT-E2 e TOT-E3


“

Junto com as pontas CVDentus, o ultrassom é uma ferramenta de muita importância para quem busca **excelência no tratamento endodôntico**, pois auxilia em vários passos, como por exemplo: Cirurgia de acesso conservadora, Limpeza da cavidade, PUI, Remoção de núcleos, Retratamento, entre outros.

DRA. RODRIGO VILLAGRA
Especialista em Endodontia


”

ATIVACÃO

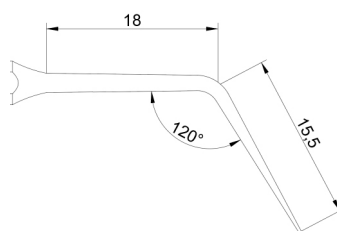


Cod. **TOT-E1**
Ø 0,3mm

- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.)
- Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza

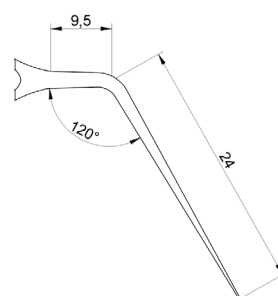

Cod. **TOT-E2**
Ø 0,3mm


- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.)
- Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza

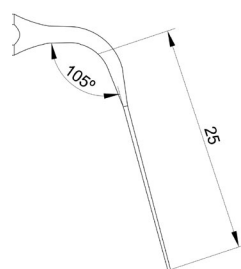

Cod. **TOT-E5**
Ø 0,3mm


- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.)
- Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza

LIMPEZA DE CANAIS EM RETRATAMENTO

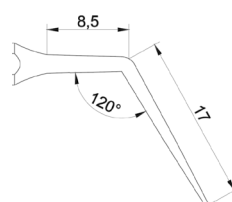


Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

- Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico

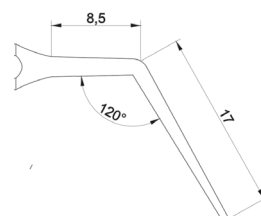

Cod. **TIT-E**
Ø 0,65mm


- Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico

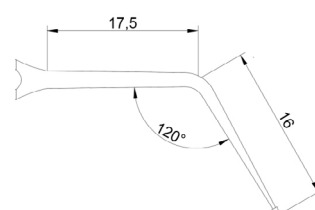

Cod. **TOT-E3**
Ø 0,45mm


- Limpeza de áreas de difícil acesso, removendo a guta-percha e cimento remanescente

REMOÇÃO DE PINOS

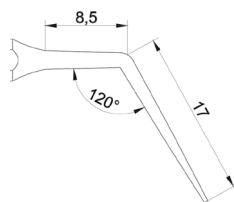


Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e dentro do canal até 1/3 médio/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

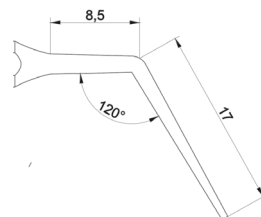

Cod. **TIT-E**
Ø 0,65mm



- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

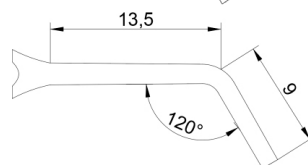

Cod. **C2T**
Ø 1,6mm


- Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados

REMOÇÃO PINO DE FIBRA DE VIDRO

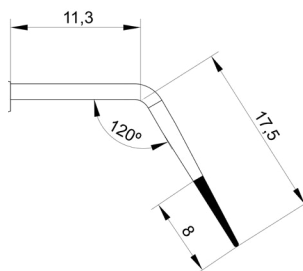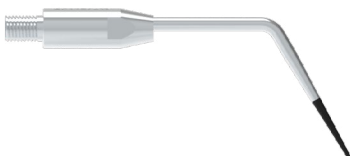

Cod. **TR1-E**
Ø 0,8mm

- Realiza o desgaste do pino auxiliando na sua remoção

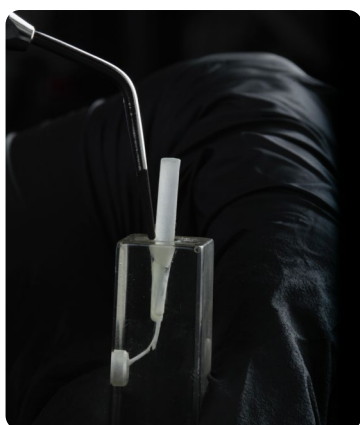



Fotos: . Profa. Ellen Mangabeira
Desgaste e remoção do pino de fibra de vidro
Cod. TR1-E

O inserto TR1-E é um diferencial no mercado, pois proporciona o desgaste do pino de fibra preservando ao máximo a dentina comparado aos métodos tradicionais, ao formato, usabilidade e tecnologia diferenciada do tratamento de superfície do diamante que só a CVDENTUS tem.

PROFa. ELLEN MANGABEIRA


Especialista em Prótese Dentária APCD SP e Endodontia pela USP; Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic; Profa. De Prótese Dentária; Parceira no desenvolvimento do Inserto TR1-E

Abertura da janela óssea

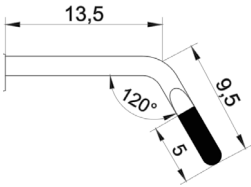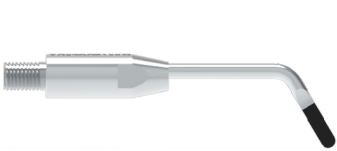


Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm


Apicectomia

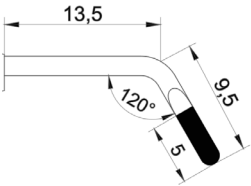

Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm


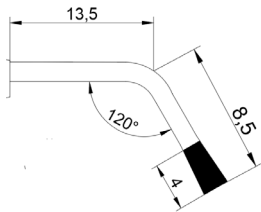


Cod. **W1**
0,5mm x 2,5mm


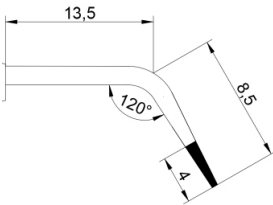


Cod. **W1-O**
0,5mm x 2,5mm

Retropreparo

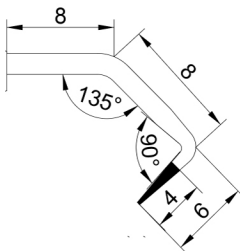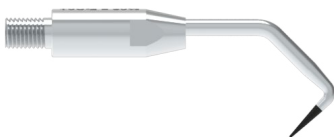

Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm

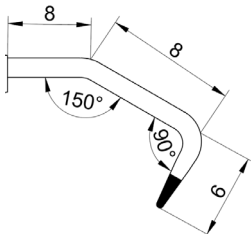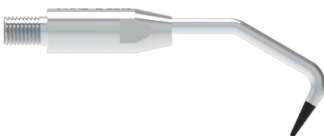

Cod. **T1F-2**
Ø 0,5mm

Retropreparo em posteriores



			Cod. T0U-L Ø 0,25mm
			Cod. T0U-R Ø 0,25mm
			Cod. T1F-L Ø 0,5mm
			Cod. T1F-R Ø 1,0mm

PERIODONTIA




AUMENTO DE COROA CLÍNICA

Com abertura de retalho

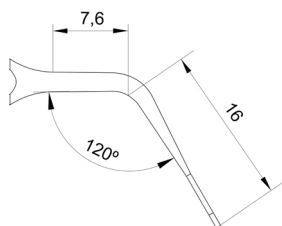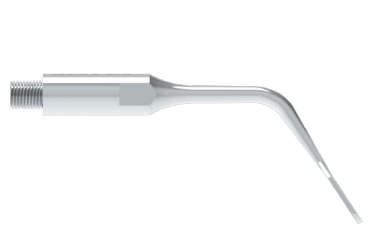


Cod. **L3S-O**
 ∇ 0,5mm x 3,5mm

- Realiza o descolamento da gengiva

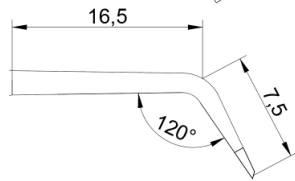



Cod. **FS-O**
 ∇ 0,4mm x 2,5mm

- Realiza a raspagem do osso espesso

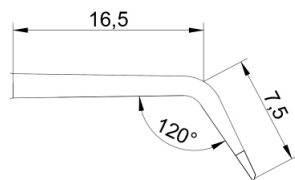


Cod. **FS2-O**
 ∇ 3,5mm x 0,4mm

- Realiza a raspagem mais ampla do osso espesso

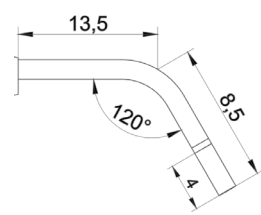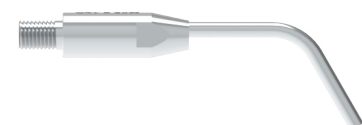



Cod. **C4T**
 $\varnothing$ 1,6mm

- Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
- Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm

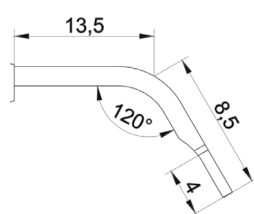


Cod. **CH4T-M**
 $\varnothing$ 1,6mm

- Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
- Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm

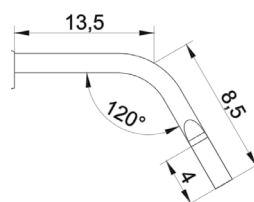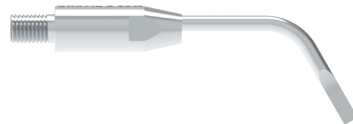

Cod. **CH4T-L**
 $\varnothing$ 1,6mm


- Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
- Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm

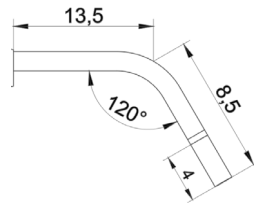

Cod. **CH4T-R**
 $\varnothing$ 1,6mm


- Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
- Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm

Sem abertura de retalho

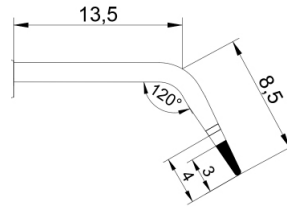


Cod. **TR1-PK**
Ø 0,5mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm

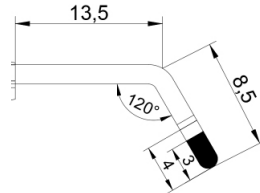


Cod. **VR1-RPK**
Ø 1,2mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm

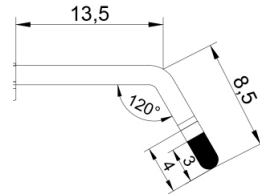

Cod. **VR1-LPK**
Ø 1,2mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm

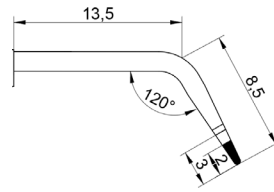

Cod. **TR12-PK**
Ø 0,5mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva
- Possui 2mm de diamante e marcação de profundidade em 3 e 4 mm



Foto: Prof. Paulo Kano -
Detalhe de excesso de gengiva removido
Cod. VR1-LPK



Foto: Prof. Marcelo de Faveri -
Cirurgia Flaples
Cod. TR1-PK



Foto: Prof. Paulo Kano -
Pós Operatório (1 Dia)

“

Eu uso os **insertos de diamante CVDentus** para fazer aumento de coroa sem abertura de retalho, sem danos ao tecido gengival, melhor precisão, **proporcionando mais conforto para o paciente** com um pós-operatório mais rápido.


PROF. PAULO KANO

Mestre em Implantodontia, Diretor do Instituto Paulo Kano, Criador e Desenvolvedor do método Clones, Criador do AST (Natomic Shell Technique) / SKIN Concept e Técnico em prótese dentária.

”


RASPAGEM SEM DIAMANTE

Supragengival

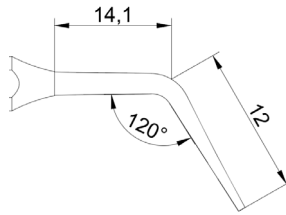


Cod. **T0T**
Ø 0,30mm


· Raspagem interproximal delicada (sem diamante)

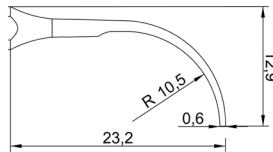

Cod. **T0TC**
Ø 0,60mm

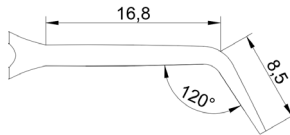


Cod. **T1T**
Ø 0,6mm

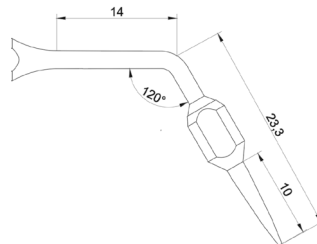


Cod. **T1T-P**
Ø 0,8mm

· Para limpeza de implantes e peças cerâmicas

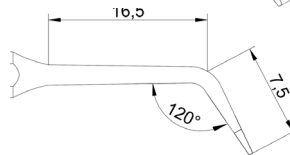


Cod. **W1T-O**
≠ 0,5mm x 2,5mm

Subgengival

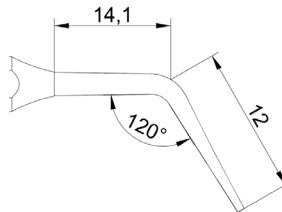

Cod. **T0T**
Ø 0,3mm

· Raspagem interproximal delicada (sem diamante)


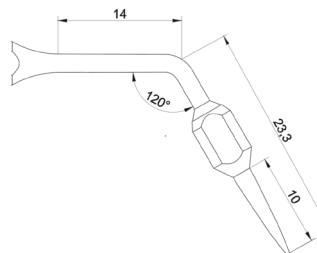


Cod. **T1T-P**
Ø 0,8mm

· Para limpeza de implantes e peças cerâmicas


RASPAGEM COM DIAMANTE

Supragengival

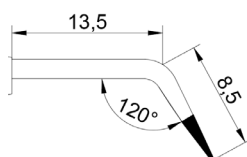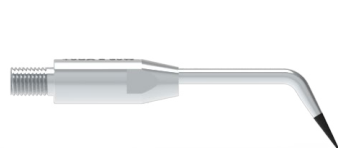


Cod. **Toux**
Ø 0,25mm

- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada

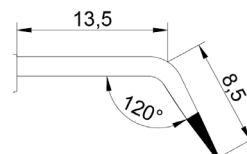


Cod. **Tou**
Ø 0,25mm

- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada

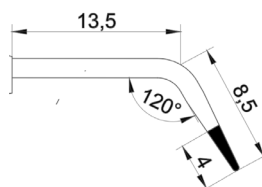


Cod. **TIU**
Ø 0,5mm

- Indicado para todos os elementos

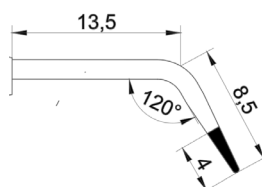


Cod. **TIUX**
Ø 0,5mm

- Indicado para todos os elementos

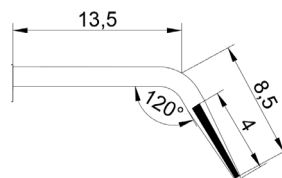

Cod. **TRIU-SD**
Ø 1,0mm


- Possui diamante apenas nas laterais de ação

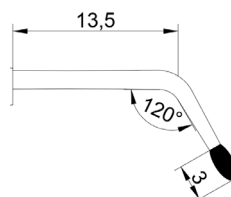

Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm


- Limpeza na face lingual dos dentes anteriores

Subgengival

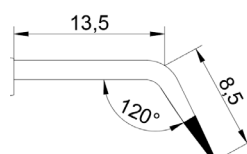


Cod. **Toux**
Ø 0,25mm

- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada

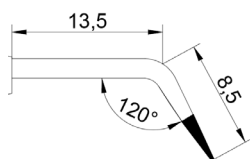



Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

- Raspagem interproximal supra e subgingival delicada


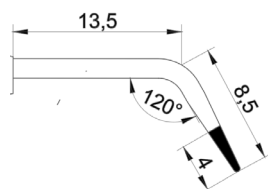


Cod. **TIUX**
Ø 0,50mm

- Indicado para todos os elementos

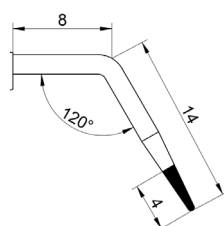
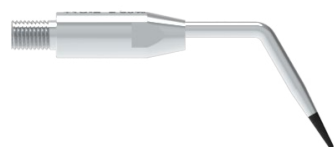


Cod. **TIUE**
Ø 0,5mm

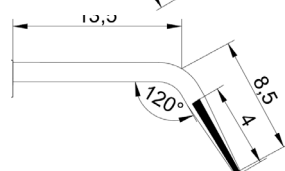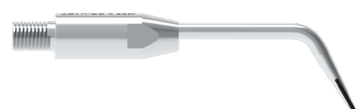



Cod. **TRIU-SD**
Ø 1,0mm

- Possui diamante apenas nas laterais de ação

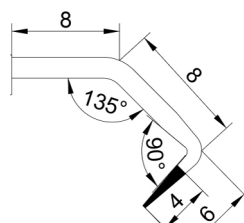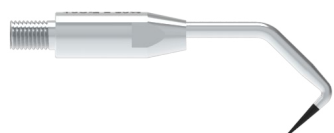

Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm



- Raspagem delicada na região de furca

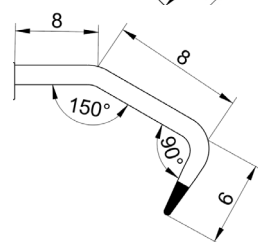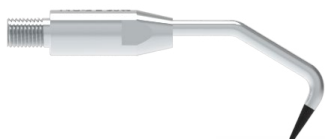

Cod. **TIU-2**
Ø 0,5mm


- Raspagem na região de furca

ALISAMENTO RADICULAR

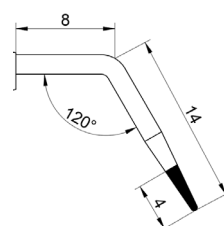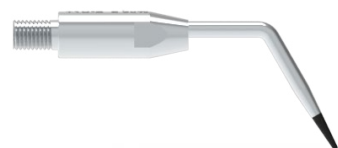

Cod. **TIFE**
Ø 0,5mm


PERIOTOMIA

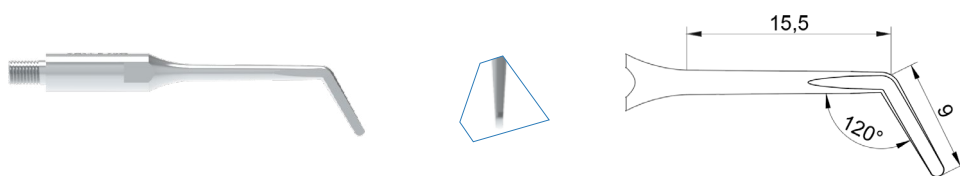

Cod. **VR1T**
 $\rightarrow$ 1,2mm x 0,4mm

· Em todos elementos

PEELING GENGIVAL

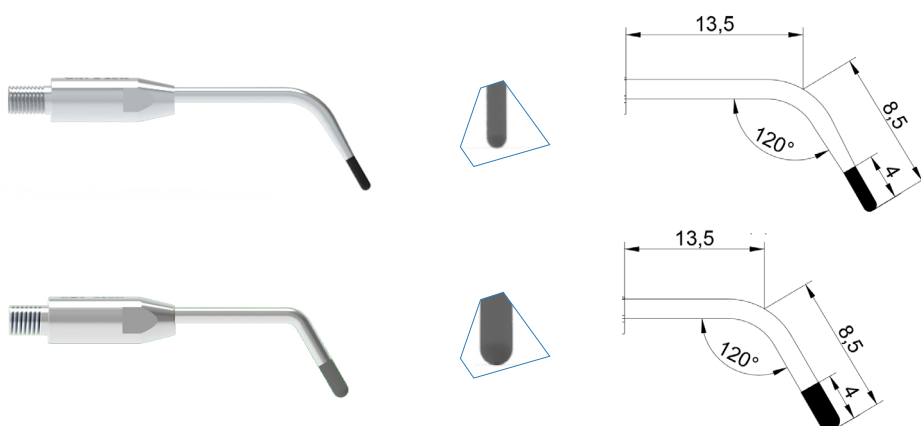

Cod. **CR1**
 $\varnothing$ 1,2mm

· Para áreas estreitas

Cod. **CR4**
 $\varnothing$ 1,6mm

· Para áreas amplas

Dentre as mais diversas aplicações, as pontas da Cvdentus também permitem realizar a melanoplastia com **grande segurança e conforto para o paciente.**

PROF. DIEGO BAZAN

Cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, Periodontia e Implantodontia.




Fotos: Diego Bazan -
Peeling gengival e pós operatório
 Cod. CR1 e CR4

Eu uso as pontas de diamante porque elas são melhores, efetivamente comprovado. Melhor do que cirurgia de peeling à laser ou com bisturi de orban. Os pigmentos tardam a reaparecer e as muitas das vezes não aparecem nunca mais.

DRA. DÉBORA AYALA

Mestre em Laser, Especialista em Periodontia, Especialista em Dentística Restauradora e Especialista em Implantodontia.

DENTÍSTICA

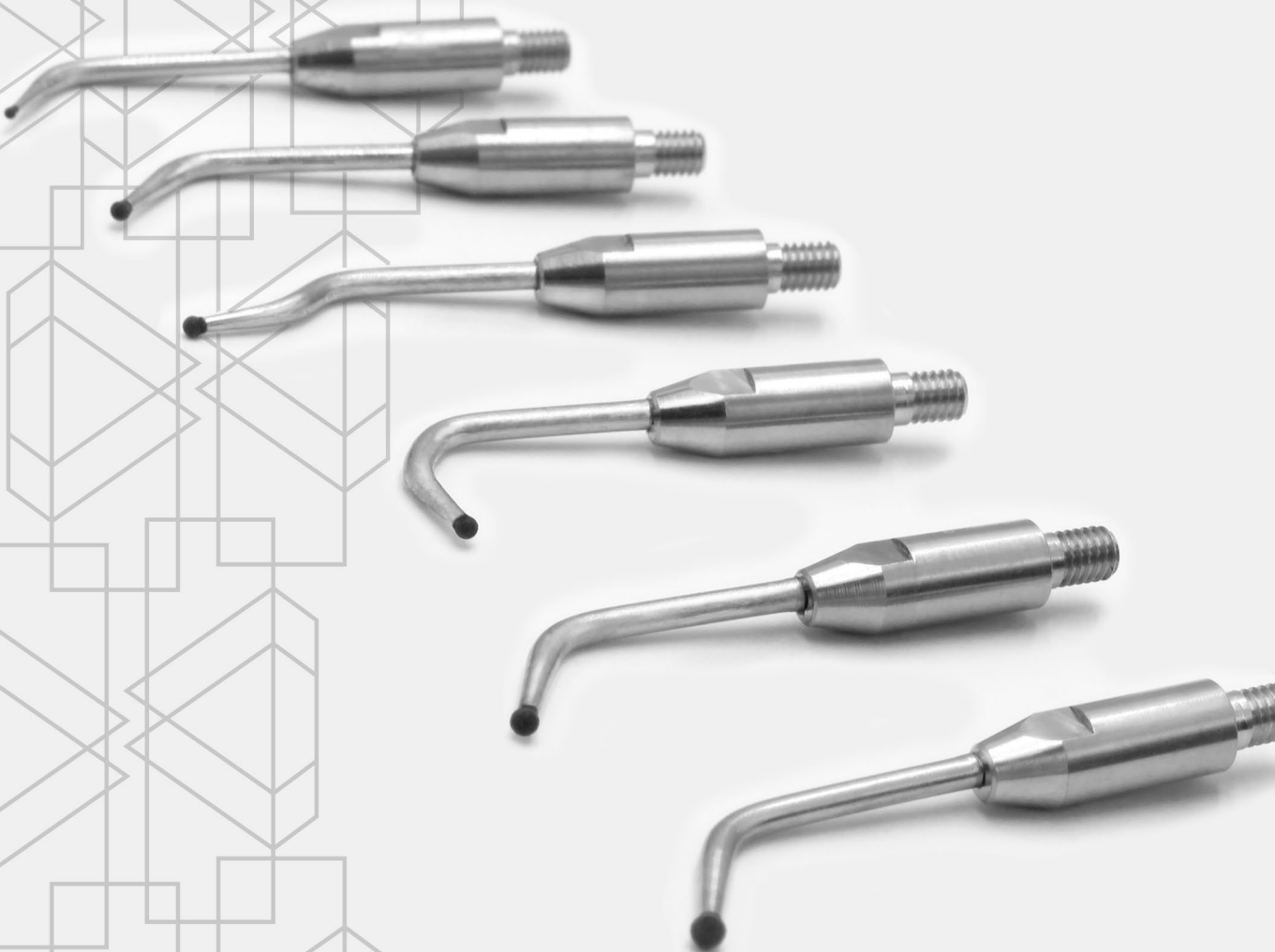


ABERTURA CAVITÁRIA

Alto desgaste




Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

• Broca de rotação


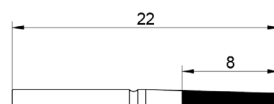


Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

• Broca de rotação


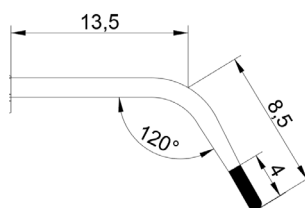


Cod. **CR1XR**
Ø 1,2mm

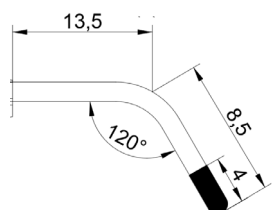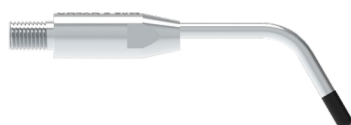


Cod. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Desgaste

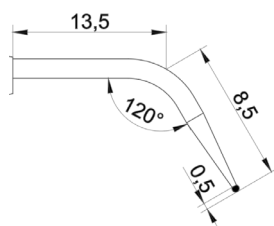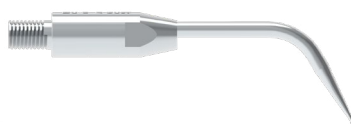


Cod. **R0,5**
Ø 0,5mm

• Cavidades pequenas

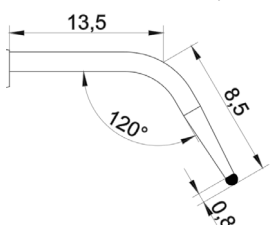


Cod. **R1**
Ø 1,0mm

• Cavidades pequenas

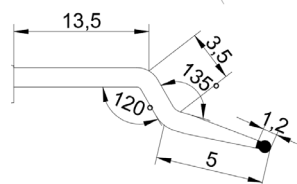


Cod. **R1-A**
Ø 1,0mm

• Cavidades pequenas
de difícil acesso como
em túnel

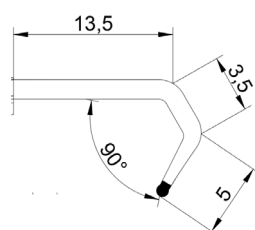



Cod. **R1-B**
Ø 1.0mm

- Cavidades pequenas de difícil acesso como face lingual de dentes anteriores e acesso tipo túnel

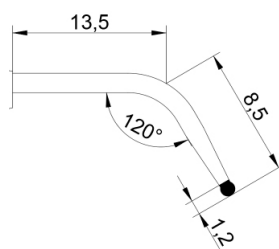



Cod. **R2**
Ø 1.2mm

- Cavidades médias

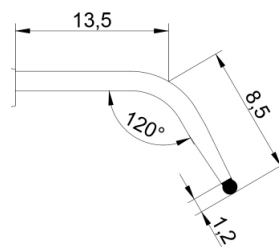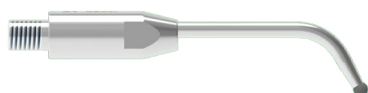



Cod. **R4**
Ø 1.5mm

- Cavidades grandes

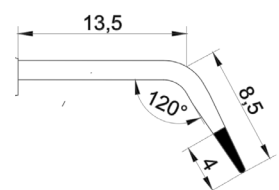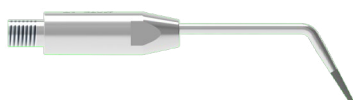


Cod. **T1**
Ø 0.5mm

- Cavidades pequenas

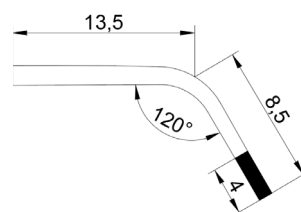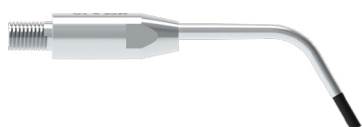



Cod. **C1**
Ø 1.2mm

- Preparo cavitário em ângulo

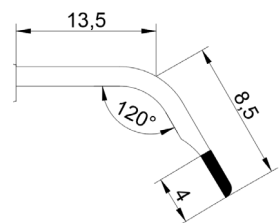



Cod. **CH1-M**
≠ 1.0mm x 0.5mm

- Cavidades interproximais pequenas (mesial)

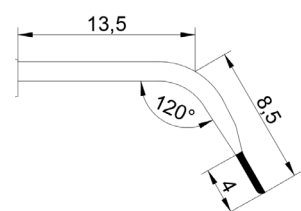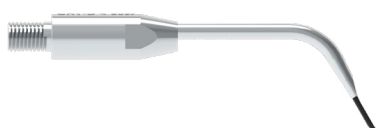



Cod. **CH1-D**
≠ 1.0mm x 0.5mm

- Cavidades interproximais pequenas (distal)

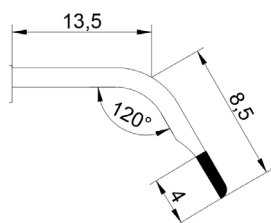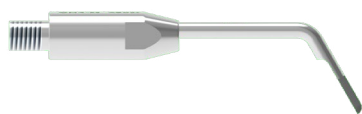

Cod. **CH4-M**
 ≡ 1.6mm x 0.8mm

• Cavidades interproximais grandes (mesial)

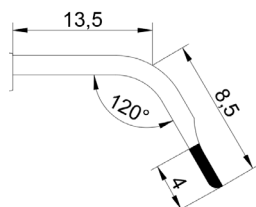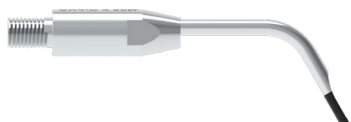

Cod. **CH4-D**
 ≡ 1.6mm x 0.8mm

• Cavidades interproximais grandes (distal)


“

Segurança e precisão é tudo que preciso na minha prática diária, como clínico geral. Poder trabalhar com a CVDentus traz facilidades em todos procedimentos que executo, dos mais simples aos mais complexos, além de ser completamente portátil e ter um **design inovador e arrojado**.

PROF. **GUSTAVO PETRIS**

Mestre em Clínica Odontológica - Biomateriais e Especialista em Implantodontia.

”

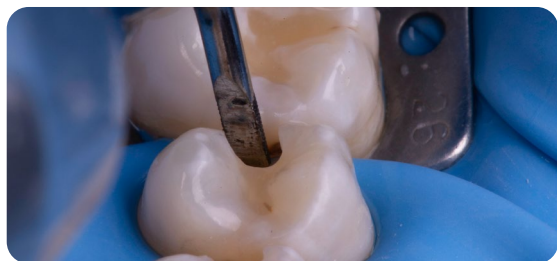

Fotos: Gustavo Petris -
Desgaste do molar em área de difícil acesso com conservação do dente adjacente
 Cod. CH4-M e CH4-D

“


Na Odontopediatria recomendo o uso da ponta com diamante CVDentus R0,5: desenvolvida com alta tecnologia, possui tamanho e angulação perfeitos para preparos cavitários pequenos, possibilitando procedimentos minimamente invasivos.

DRA. **LIETE YASSUDA**

Especialista em Odontopediatria e Periodontia


”

PREPARO EM SULCOS COM LESÕES MAIS INCIPIENTES


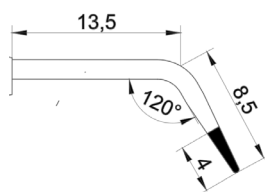


Cod. **T1**
Ø 0,5mm

PREPARO EM ÂNGULOS


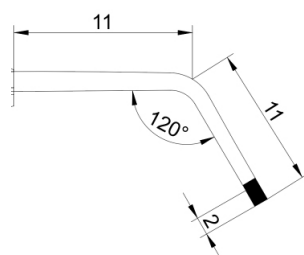


Cod. **C22-E**
Ø 1,2mm

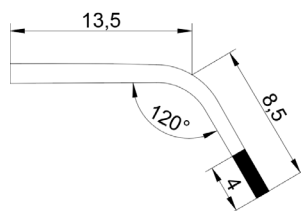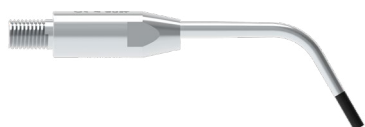

Cod. **C1**
Ø 1,2mm

BISELAMENTO

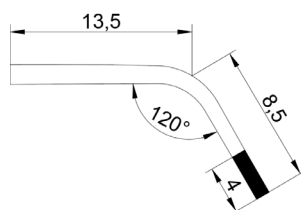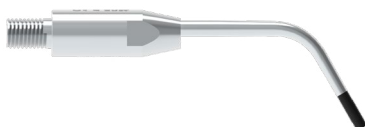

Cod. **C1**
Ø 1,2mm

Com o diamante CVDentus, é possível fazer **tratamentos e preparos que nenhuma outra ponta consegue fazer**. É espetacular!

PROF. **DIRCEU VIEIRA**

Doutor e Mestre Dentística, Coordenador dos cursos de Especialização da ABO Osasco, Santos e ABS - São Paulo.


REMOÇÃO DE MATERIAL RESTAURADOR

Alto desgaste



Cod. **FR4-H**
Ø 1,6mm

- Broca de rotação. Indicado para face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal

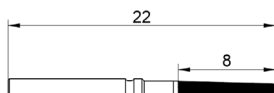

Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm



- Broca de rotação



Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm


- Broca de rotação

Desgaste

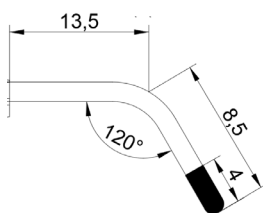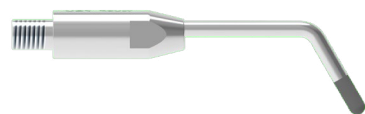

Cod. **CR4**
Ø 1,6mm


- Término da remoção

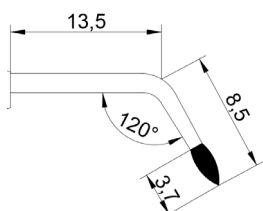

Cod. **F4**
Ø 1,6mm



- Remoção em face lingual de dentes anteriores ou oclusal

Desgaste fino

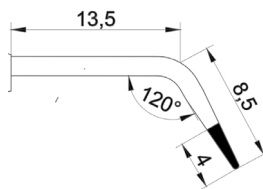


Cod. **TIF**
Ø 0,5mm

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival

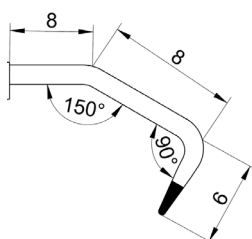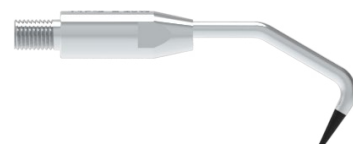


Cod. **TIF-2**
Ø 0,5mm

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face lingual

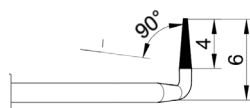

Cod. **TIF-L**
Ø 0,5mm


- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular

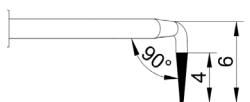

Cod. **TIF-R**
Ø 0,5mm


- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular

Refinamento do desgaste

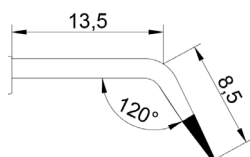

Cod. **T0U**
Ø 0,25mm


- Refinamento delicado em áreas interproximais

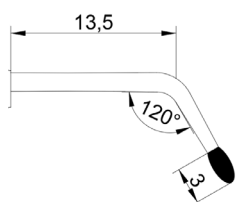

Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm


- Refinamento em face lingual de dentes anteriores ou oclusal

Remoção de amálgama

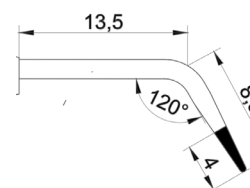


Cod. **T1**
Ø 0,5mm

- Área pequena

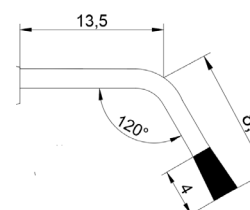

Cod. **W1**
≠ 0.5mm x 2.5mm


- Área grande

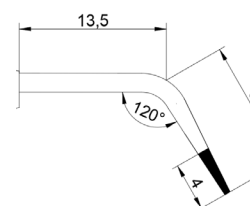



Cod. **W1-O**
≠ 0.5mm x 2.5mm

- Área grande

CONTORNO PAPILAR

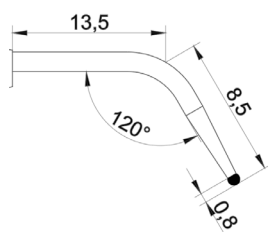


Cod. **R1**
Ø 1,0mm

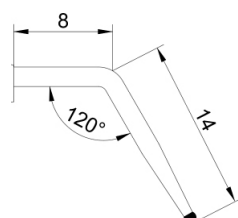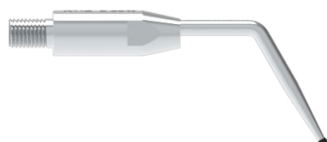


Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

TEXTURIZAÇÃO EM MATERIAL RESTAURADOR

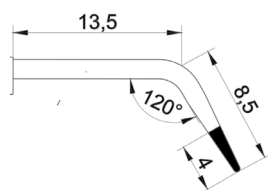

Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

ODONTOSECÇÃO

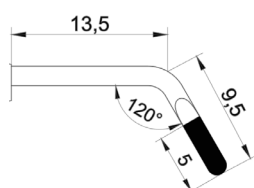

Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

PRÓTESE




PREPARO PARA LAMINADOS E LENTE DE CONTATO

Alto desgaste




Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

• Broca de rotação

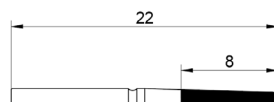


Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm


• Broca de rotação

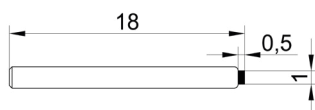


Cod. **C10.5G-H**
0,5mm

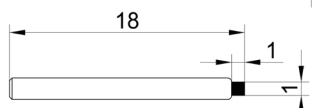

Cod. **C11.0G-H**
1,0mm

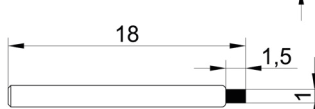

Cod. **C11.5G-H**
1,5mm

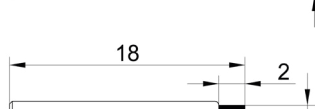


Cod. **C12.0G-H**
2,0mm


• Broca de rotação.
Possui profundidade da área ativa padronizada para o desgaste, garantindo precisão no preparo e adaptação da peça.





Fotos: Prof. Celso Sakakura

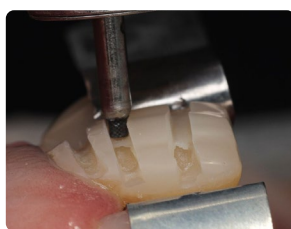

Fotos: Prof. Celso Sakakura


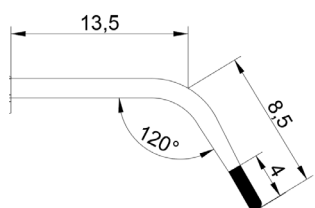


Cod. **CR1XR**
Ø 1,2mm

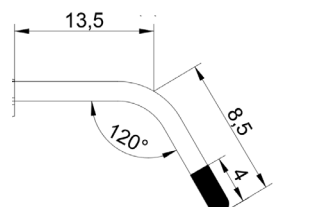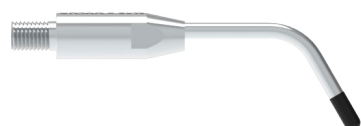



Cod. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Término do preparo

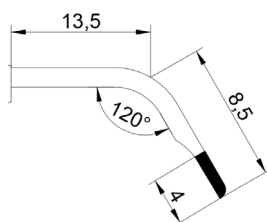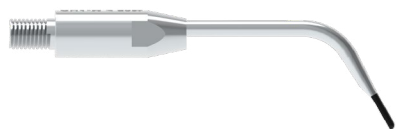

Cod. **CH1-M**
 1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (mesial).
 Margem estreita

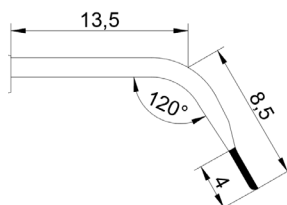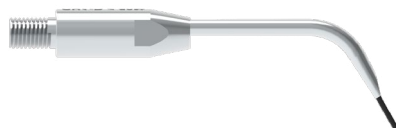

Cod. **CH1-D**
 1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (distal).
 Margem estreita



Foto: Prof. Renato Voss -
Término do preparo
 Cod. CR1




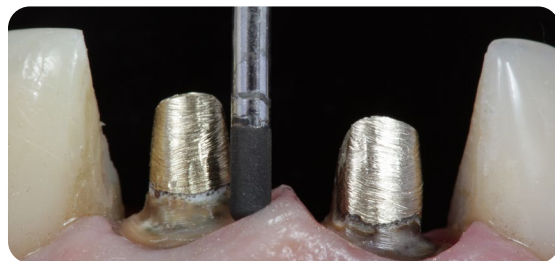


Foto: Prof. Thiago Ottoboni -
Término do preparo
 Cod. CR4

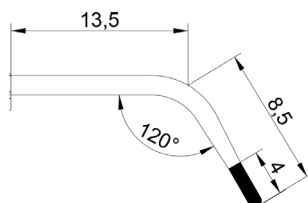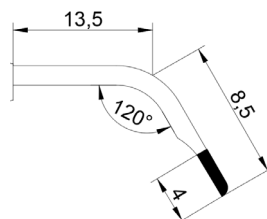



Cod. **CR1**
 Ø 1,2mm

· Desgaste. Margem estreita

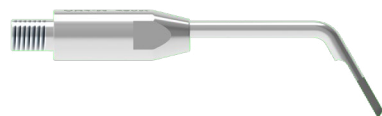



Cod. **CH4-M**
 1.6mm x 0.8mm

· Desgaste interproximal (mesial).
 Margem larga

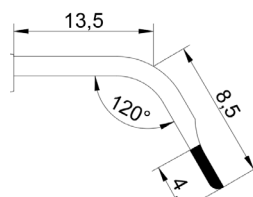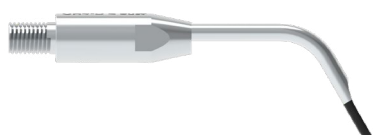

Cod. **CH4-D**
 1.6mm x 0.8mm


· Desgaste interproximal (distal).
 Margem larga

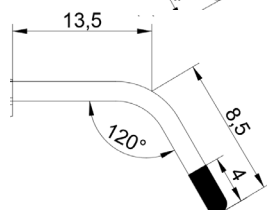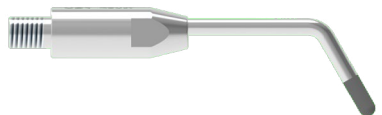

Cod. **CR4**
 Ø 1,6mm



· Desgaste. Margem larga

Refinamento do preparo

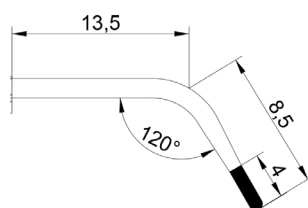


Cod. **CR1U**
Ø 1,2mm

- Refinamento e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem estreita

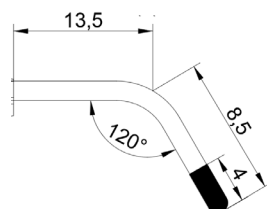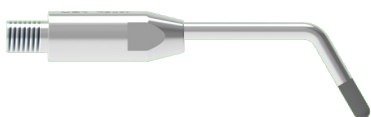


Cod. **CR4U**
Ø 1,6mm

- Refinamento e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem larga

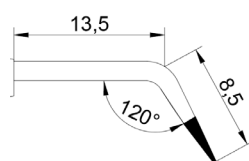



Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

- Refinamento delicado em áreas interproximais

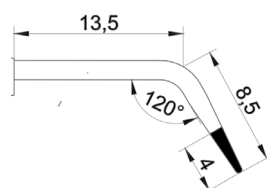


Cod. **T1U**
Ø 0,5mm

BISELAMENTO

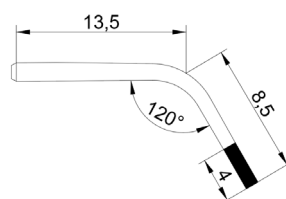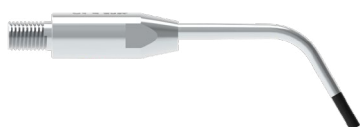


Cod. **C1**
Ø 1,2mm

TEXTURIZAÇÃO EM MATERIAL RESTAURADOR

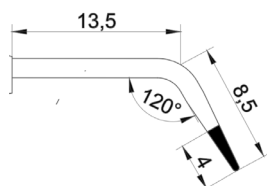

Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

REMOÇÃO DE FACETAS

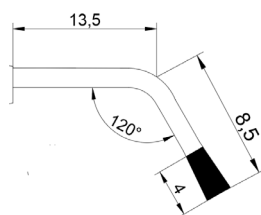

Cod. **W1**
 0.5mm x 2.5mm



Foto: Prof. Gustavo Greco -
Remoção de Faceta
 Cod. W1




Foto: Prof. Clébio Domingues -
Remoção de Faceta
 Cod. W1

Com a utilização do piezo e a ponta W1 da CVDentus, consigo remover totalmente as facetas e lentes de contato. Faço uma secção, e com a dilatação realizo a escamação. **Um procedimento muito rápido, simples, e sem danificar o dente.**

PROF. GUSTAVO GRECO


Doutor em Odontologia, Mestre em Especialista em Prótese Dentária, Coordenador do curso de Especialização em Prótese Dentária e Implantodontia - ABO-MG.

REMOÇÃO DE PINOS

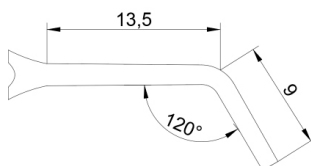


Cod. **C2T**
 Ø 1,6mm

• Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados

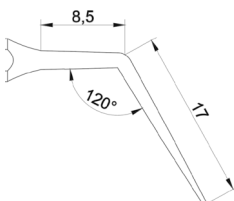



Cod. **TOT-E**
 Ø 0,4mm

• Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e dentro do canal até 1/3 médio/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

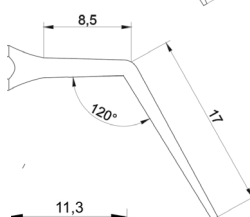

Cod. **TIT-E**
 Ø 0,65mm


• Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

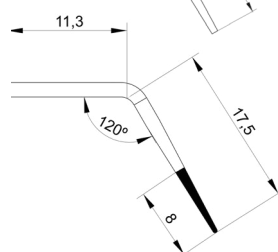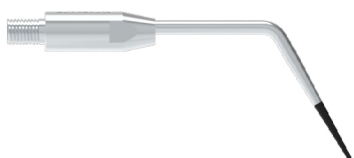

Cod. **TRI-E**
 Ø 0,8mm

• Realiza o desgaste do pino de fibra de vidro auxiliando na sua remoção

CIMENTAÇÃO DE LENTES E PRÓTESES

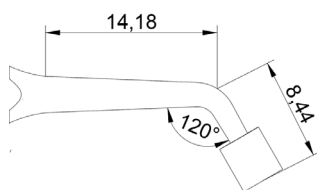

Cod. **CM4**
Ø 3,7mm



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi -
Cimentação
Cod. CM4



Foto: Prof. Rogério Marcondes -
Cimentação.
Cod. CM4


“ A ponta de Cimentação CM4 da CVDentus é um **produto único no mercado mundial, que proporciona um perfeito assentamento de artefatos cerâmicos**, independente da viscosidade do material cimentante.

PROF. ROGÉRIO MARCONDES

Especialista em Dentística Restauradora, Membro Fundador do Paraná Dental Team e Diretor Clínico do Dental Esthetic Center e Professor do Dental Esthetic Center Training.


REMOÇÃO DE EXCESSO DE MATERIAL

Alto desgaste

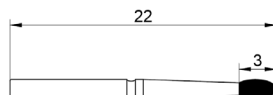

Cod. **FR4-H**
Ø 1,6mm

· Broca de rotação. Indicado para face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal

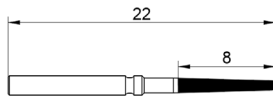

Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm


· Broca de rotação



Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação



Desgaste

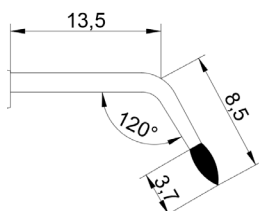

Cod. **F4**
Ø 1,6mm


· Indicado para face lingual dos dentes anteriores ou oclusal

Desgaste fino

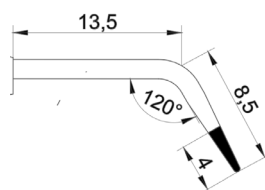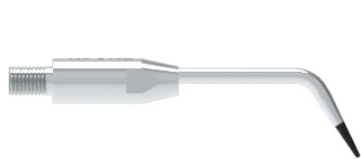

Cod. **TIF**
Ø 0,5mm


- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival

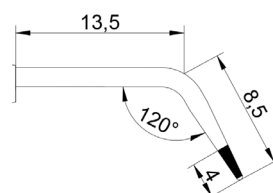

Cod. **TR1F-RV**
0,5mm x 2,5mm


- Não possui diamante no topo, realizando o acabamento cervical em restaurações de resina composta

Refinamento do desgaste


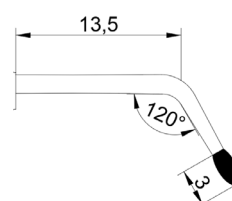


Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm


- Indicado para face lingual dos dentes anteriores e oclusal

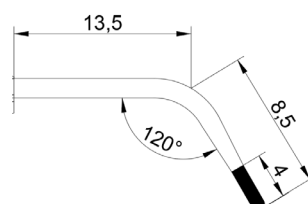

Cod. **CR1U**
Ø 1,0mm

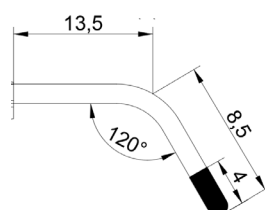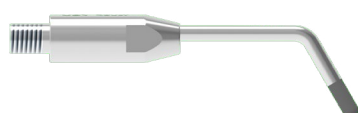


Cod. **CR4U**
Ø 1,6mm

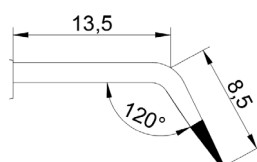


Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

- Apenas para áreas de difícil acesso

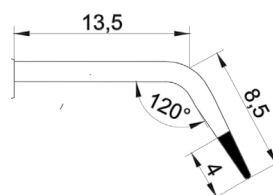


Cod. **T1U**
Ø 1,0mm

SLICE / DESGASTE INTERPROXIMAL

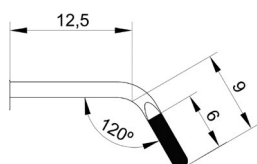


Cod. **FR02XR**
 ≡ 1,6mm x 0,2mm

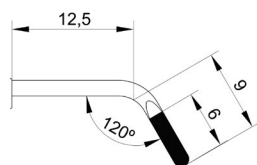

Cod. **FR04XR**
 ≡ 1,6mm x 0,4mm

ODONTOSECÇÃO

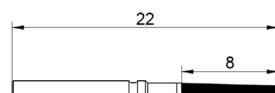


Cod. **TR18-H**
 Ø 0,5mm

· Broca de rotação




Cod. **TR38-H**
 Ø 1,0mm


· Broca de rotação

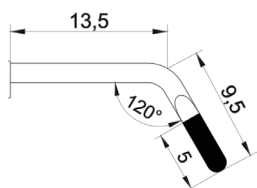

Cod. **VR04XR**
 ≡ 1,6mm x 0,4mm

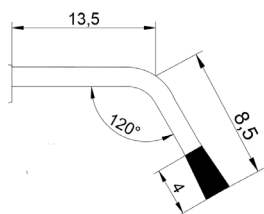


Cod. **W1**
 ≡ 0,5mm x 2,5mm

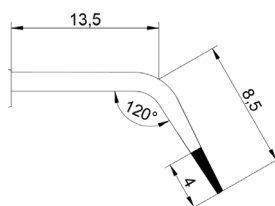

Cod. **W1-O**
 ≡ 0,5mm x 2,5mm.

CIRURGIA



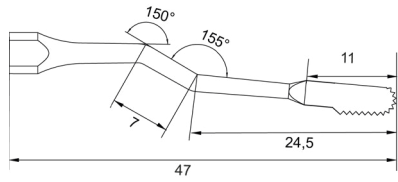


Cod. **SFR42**
‣ 0,60mm

- Alta eficiência de corte ósseo em locais de difícil acesso




Cod. **SFR43**
‣ 0,40mm

- Alta eficiência de corte ósseo em locais de difícil acesso

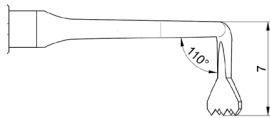


Cod. **SF3-R**
‣ 0,40mm

- Corte ósseo lateral, para áreas de difícil acesso

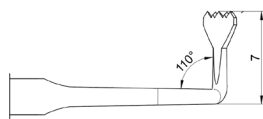


Cod. **SF3-L**
‣ 0,40mm

- Corte ósseo lateral, para áreas de difícil acesso

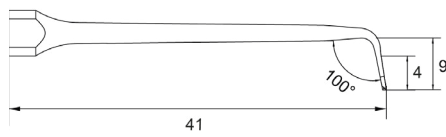


Cod. **SF32-O**
‣ 0,40mm

- Corte ósseo na ortogonal, para áreas de difícil acesso

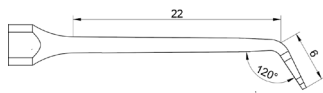

Cod. **SF38-O**
‣ 0,28mm


- Corte ósseo na ortogonal, para áreas de difícil acesso

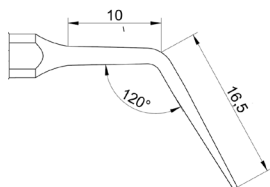


Cod. **SFTV2-O**
‣ 0,40mm

- Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados/ Abertura de loja cirúrgica


Para áreas delicadas

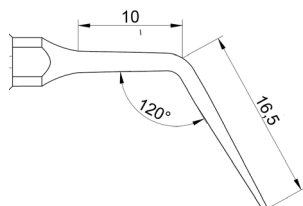


Cod. **SFTV-O**
 0,40mm

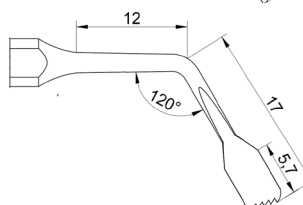


Cod. **SF3F**
 0,40mm

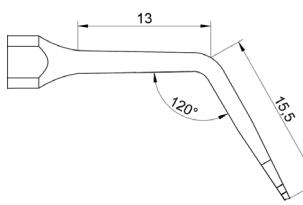

Cod. **SF3F-O**
 0,40mm
 • Corte ósseo orto-
 gonal

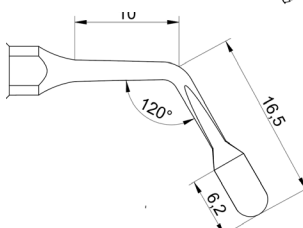

Cod. **SL1**
 0,28mm

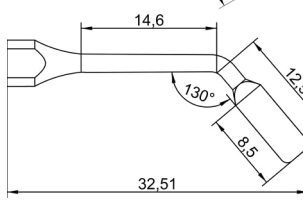

Cod. **SL2**
 0,30mm



Foto: Profs. Alan Costa e Shaban Burgoa -
Regularização Ósseo-Guiada
 Cod. SF3 e SF38

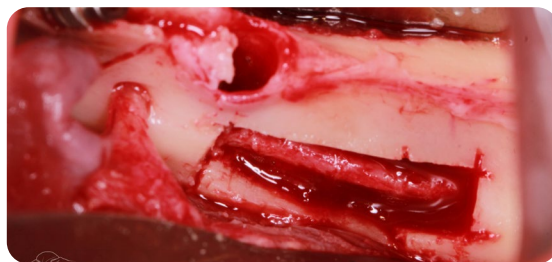









Foto: Prof. Ricardo Scotton -
Lateralização do Nervo Alveolar inferior
 Cod. SF3 e SF38

Utilizo as pontas SF3 e SF38 devido ao seu **alto poder de corte**, preservando sempre a maior quantidade de material com muita **previsibilidade e segurança**.


PROF. **RICARDO SCOTTON**

Mestre e Especialista em Implantodontia, Coordenador do curso de Cirurgia Avançada In Surgery.

RASPAGEM/ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E COLETA DE OSSO AUTÓGENO

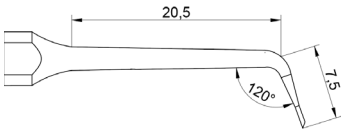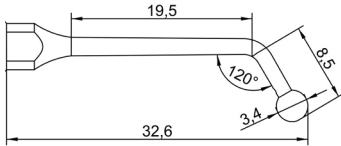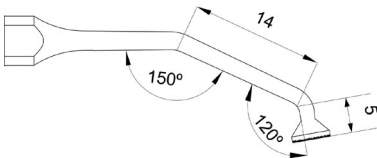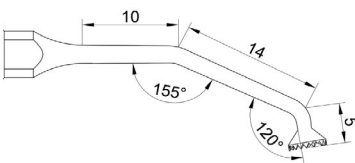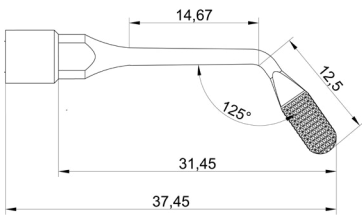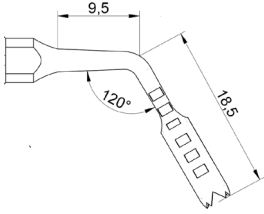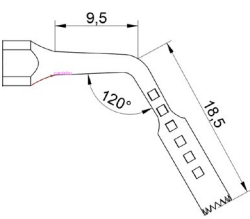			Cod. SFS3-O Ø 0,4mm • Raspagem e coleta de osso autólogo
			Cod. SR11 Ø 3.4mm • Raspagem e regularização de superfície
			Cod. SE9F Ø 3.9mm • Raspagem para acabamento e regularização da superfície óssea
			Cod. SE9C Ø 3.9mm • Raspagem e regularização da superfície óssea
			Cod. SL3G Ø 1.3mm • Raspagem e regularização da superfície óssea
			Cod. SCP Ø 3.0mm 3.5mm 3.8mm 4.1mm 4.8mm • Coleta tipo bloco • Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade
			Cod. SCPF Ø 3.0mm 3.5mm 3.8mm 4.1mm 4.8mm • Coleta tipo bloco. • Perfuração óssea mais delicada • Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

LIMPEZA DE CAVITAÇÕES ÓSSEAS

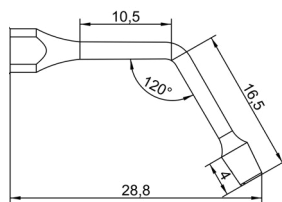

Cod. **ST10G**
Ø 3.5mm

Achei o inserto ST10G espetacular devido ao tamanho e anatomia da parte ativa. Permite excelente e rápida limpeza de Cavitações ósseas/ NICOS... Além disso a irrigação interna com dupla perfuração (no ápice e na lateral da parte ativa) garante ótima refrigeração durante o procedimento. Recomendo!!!


PROF. CÉSAR PANIGHEL

Especialista e Mestre em Implantodontia; Pós Graduado em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase - Prevenção e Tratamento de Doenças relacionadas a Idade; Hipnose Clínica; Odontologia Biológica; Parceiro no desenvolvimento do Inserto ST10G.



Foto: Prof. César Panighel

LIMPEZA DE ALVÉOLOS

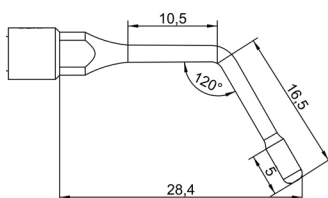

Cod. **SCR7**
Ø 2.5mm

A SCR7 faz uma **excelente descorticalização e remoção do ligamento periodontal dos alvéolos** de extração facilitando a osseointegração dos implantes cerâmicos.


DR. FERNANDO AVELAR

Implantodontista cerâmico - Swiss BioHealth Academy




Foto: Dr. Fernando Avelar

TREFINA

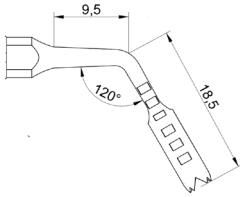

Cod. **SCP**
 Ø 3.0mm
 3.5mm
 3.8mm
 4.1mm
 4.8mm


- Perfuração óssea
- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

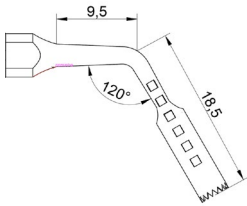


Cod. **SCPF**
 Ø 3.0mm
 3.5mm
 3.8mm
 4.1mm
 4.8mm

- Perfuração óssea mais delicada
- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

DESCOLAMENTO DA MEMBRANA SINUSAL

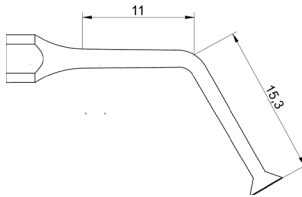


Cod. **SE1**
 Ø 3,9mm

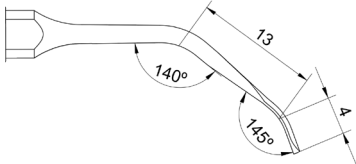


Cod. **SLO-2**
 0,70mm x 3,5mm

DESCOLAMENTO DE RETALHO

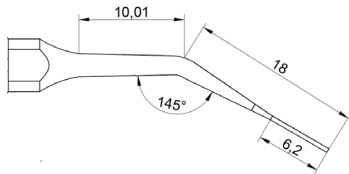



Cod. **SLTV-O**
 0,40mm

PERFURAÇÃO ÓSSEA / PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

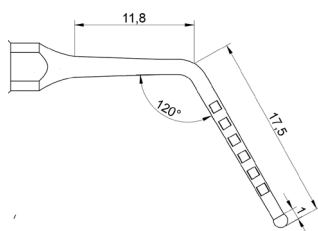


Cod. **SR2**
Ø 1,3mm

- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

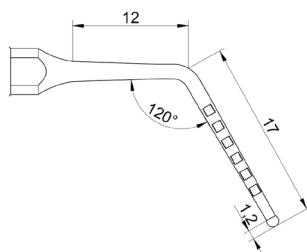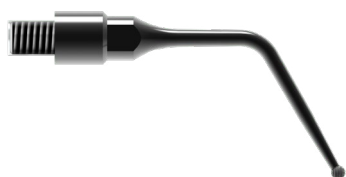


Cod. **SR4**
Ø 1,5mm


- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

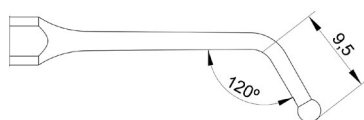

Cod. **SR9**
Ø 2,5mm

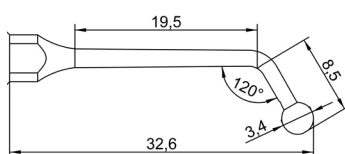


Cod. **SR11**
Ø 3,4mm

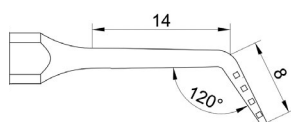


Cod. **STR1**
Ø 0,6mm

- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

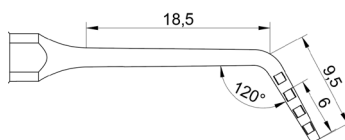


Cod. **STR4**
Ø 1,5mm

- Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

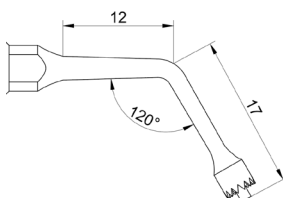

Cod. **SI**
Ø 3,0mm
3,5mm
3,8mm
4,1mm
4,8mm


- Guia para SCP

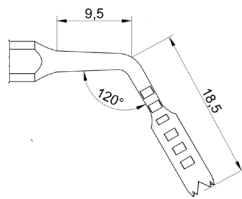

Cod. **SCP**

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm


· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

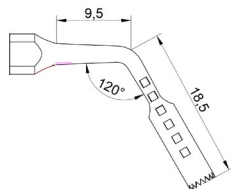

Cod. **SCPF**

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perfuração óssea mais delicada
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

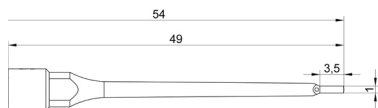

Cod. **SF2**

Ø 0.6 / 1.0mm


· Possui 3.5mm de profundidade de área ativa



Cod. **ST23**

Ø 2.45mm

· Ponta longa para perfuração em local de difícil acesso.
Possui marcação de profundidade


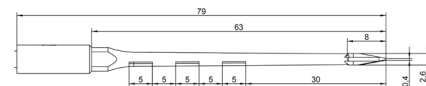


Cod. **ST33**

Ø 2.6mm

· Ponta longa para perfuração em local de difícil acesso.
Possui marcação de profundidade


PERIOTOMIA

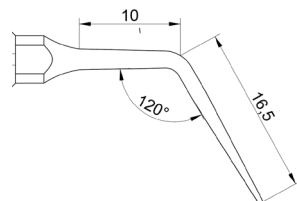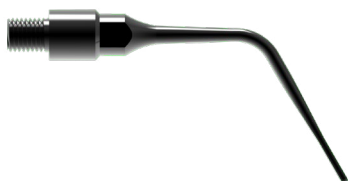

Cod. **SFTV-O**

Ø 0.40mm

· Em todos os elementos

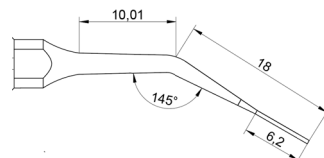


Cod. **SLTV-O**

Ø 0.40mm


· Em molares

CORTE DA RAÍZ

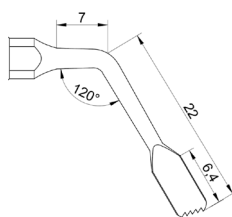


Cod. **SF3**
 0,28mm

- Fracionamento de raiz anquilosada e apicectomia

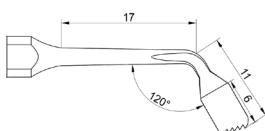


Cod. **SF38**
 0,28mm

- Fracionamento de raiz anquilosada e apicectomia

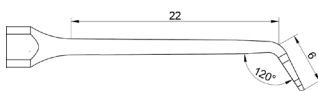


Cod. **SF38-O**
 0,28mm

- Fracionamento de raiz anquilosada e apicectomia

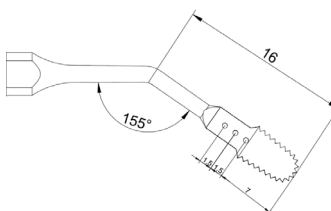

Cod. **SFR4**
 0,45mm

- Fracionamento de raiz anquilosada e apicectomia

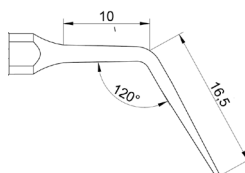

Cod. **SFTV2-O**
 0,40mm

- Apicectomia



Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Descolamento e extração do pré-molar
 Cod. SFTV2-O

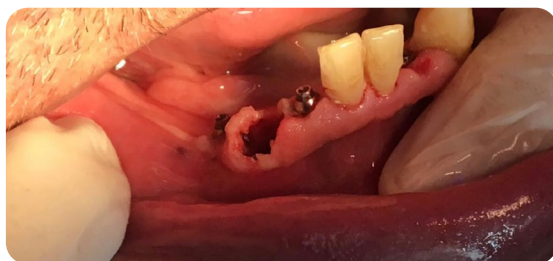


Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Descolamento e extração do pré-molar
 Cod. SFTV2-O

A ponta SFTV2-O pode ser usada tanto para abertura de loja cirúrgica, apicectomia e osteotomia em torno de ápices e implantes fraturados, como também para osteotomias delicadas **permitindo resolver situações complicadas com um mínimo de perda óssea.**

PROF. TÚLIO VALCANAIA

Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial, Sócio e Diretor do IOA - Instituto de Odontologia das Américas e Sócio e Diretor do IOA Miami - USA.

ÍNDICE

Broca Rotação

TR18-H	ENDO	- Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária - Remoção de material restaurador	26 30
	PRÓTESE	- Preparo para laminados e lente de contato - Remoção de excesso de material - Odontosecção	34 38 40
	ENDO	- Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
TR38-H	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária - Remoção de material restaurador	26 30
	PRÓTESE	- Preparo para laminados e lente de contato - Remoção de excesso de material - Odontosecção	34 38 40
	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal	30
	PRÓTESE	- Remoção de excesso de material em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal	38
FR4-H			
C10.5G-H			
C11.0G-H			
C11.5G-H			
C12.0G-H	PRÓTESE	- Possui "stopper" de profundidade, garantindo padronização e controle durante o desgaste	34

Insertos Clínicos

C1	DENTÍSTICA	- Preparo cavitário em ângulos - Preparo em ângulo	27 29
	PRÓTESE/ DENTÍSTICA	- Biselamento	29/36
C22-E	ENDO DENTÍSTICA	- Preparo da câmara pulpar - Preparo em ângulos	08 29
C2T	ENDO/ PRÓTESE	- Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados	14/ 37
CR2T-E	ENDO	- Corte e compactação da guta percha	11
C4T			
CH4T-M			
CH4T-L	PERIO	- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. (mini flap) Indicado para desgaste do osso mais espesso.	18
CH4T-R			
CH1-M (mesial)	DENTÍSTICA	- Abertura de cavidades interproximais pequenas (mesial ou distal)	27
CH1-D (distal)	PRÓTESE	- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (mesial ou distal).	35
CH4-M (mesial)	DENTÍSTICA	- Abertura de cavidades interproximais grandes (mesial ou distal)	28
CH4-D (distal)	PRÓTESE	- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (mesial ou distal).	35
CM4	PRÓTESE	- Cimentação de lentes e próteses	38
CR1XR	DENTÍSTICA	- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket	26
	PRÓTESE	- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato	34
CR1	PERIO PRÓTESE	- Peeling Gingival. Área estreita - Desgaste para o término de preparo. Margem estreita	23 35
CR1U	PRÓTESE	- Refinamento do preparo e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem estreita	36
		- Refinamento do desgaste em remoção do excesso de material	39
CR4XR	DENTÍSTICA	- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket	26
	PRÓTESE	- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato	34
CR4	PERIO PRÓTESE DENTÍSTICA	- Peeling Gingival. Área ampla - Término de preparo (margem larga) - Desgaste. Término da remoção do material restaurador	23 35 30
CR4F-ST	ENDO	- Desgaste fino das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho	09
CR4U	PRÓTESE	- Refinamento do preparo e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. - Refinamento do desgaste para remoção de excesso de material	36 39
F4	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Remoção do excesso de material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal	30/ 38

FR4U	DENTÍSTICA/ PRÓTESE PERIODONTIA	- Refinamento do desgaste do material restaurador em face lingual dos dentes anteriores e oclusal - Raspagem com diamante supragengival em face lingual dos dentes anteriores	31/39 21
FR02-XR FR04-XR	PRÓTESE	- Slice/ Desgaste interproximal	40
FS-O	PERIO	- Aumento de coroa com abertura de retalho (raspagem do osso espesso)	18
FS2-O	PERIO	- Aumento de coroa com abertura de retalho (raspagem mais ampla do osso espesso)	18
L3S-O	PERIO	- Descolamento da gengiva	18
R0,5	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena	26
R1	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena - Contorno papilar	26 32
R1-A	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena de difícil acesso como em túnel	26
R1-B	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena de difícil acesso como face lingual de dentes anteriores e acesso tipo túnel	27
R1-E	ENDO DENTÍSTICA	- Desgaste para o preparo da câmara pulpar, permitindo a remoção do teto e da dentina - Remoção de nódulo pulpar - Localização do canal - Contorno papilar	08 09 09 32
R2	ENDO DENTÍSTICA	- Desgaste para o acesso à câmara pulpar - Desgaste. Cavidades médias	08 27
R4	ENDO DENTÍSTICA	- Desgaste para o acesso à câmara pulpar - Desgaste. Cavidades grandes	08 27
T0T	PERIO	- Raspagem interproximal supra e subgingival convencional delicada (sem diamante)	20
T0TC	PERIO	- Raspagem supragengival	20
T0T-E T1T-E	ENDO ENDO/ PRÓTESE	- Localização de canal - Remoção do trigono da dentina - Limpeza de canais em retratamento - Remoção de instrumento fraturado - (T0T-E) - Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (T0T-E). Finalização da remoção do pino de fibra de vidro	09 10 13 12 14/37
T0T-E1 T0T-E2	ENDO	- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) - Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza - Corte e termoplastificação de guta percha - Remoção de instrumento fraturado	13 13 11 12
T0T-E3	ENDO	- Limpeza de canais achatados - Limpeza de canais em retratamento	11 13
T0T-E5	ENDO	- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) - Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza	13 13
T0U	DENTÍSTICA/ PRÓTESE PERIO	- Refinamento delicado em áreas interproximais - Raspagem interproximal supra e subgingival delicada (com diamante)	36/39 21/22
T0U-2	PERIO ENDO	- Raspagem delicada na região de furca (com diamante) - Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em anteriores	22 15
T0U-L T0U-R	ENDO	- Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em posteriores	16
T0UX	PERIO	- Raspagem interproximal supra e subgingival delicada (com diamante)	21
T1	DENTÍSTICA	- Desgaste para cavidade pequena - Remoção de amálgama pequena ou material restaurador - Preparo em sulcos com lesões mais incipientes	27 31 29
T1F	PRÓTESE/ DENTÍSTICA	- Texturização em material restaurador - Desgaste fino para remoção de material restaurador na região intrapapilar, supra e subgingival	32/36 30/39

T1F-2	ENDO	- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores	15
	DENTÍSTICA	- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face lingual	30
T1F-E	ENDO	- Localização de canal - Desobstrução de canal - Limpeza da área de istmo	9 10 10
	PERIO	- Remoção de nódulo pulpar - Alisamento radicular	22
T1F-L (distal)	ENDO	- Cirurgia parendodôntica. Retropreparo em posteriores	16
T1F-R (right)	DENTÍSTICA	- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular	31
T1T	PERIO	- Raspagem supragengival convencional (sem diamante)	20
T1T-P	PERIO	-Raspagem supra e subgingival convencional (sem diamante) para limpeza de implantes e peças cerâmicas	20
T1U	PERIO	- Raspagem supragengival (com diamante)	21
	PRÓTESE	- Refinimento desgaste para remoção de excesso de material restaurador e do preparo para laminados e lente de contato	36/39
T1UX	PERIO	- Raspagem sub e supragengival (com diamante)	21/22
T1U-2	PERIO	-Raspagem na região de furca (com diamante)	22
T1U-E	PERIO	- Raspagem subgingival (com diamante)	22
TR1-E	ENDO	- Remoção do pino de fibra de vidro	14/37
TR1-PK VR1-RPK VR1-LPK	PERIO	-Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva.	19
TR12-PK	PERIO	- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva	19
TR1F-RV	PRÓTESE	- Desgaste fino na cervical de restaura em resina composta	39
TR1F-ST	ENDO	- Limpeza lateral na região do istimo - Desgaste fino na entrada do canal	10 10
TR1U-SD	PERIO	- Raspagem supra e subgingival com diamante apenas nas laterais	21/22
VR1T	PERIO	- Periotomia em todos os elementos	23
VR04XR	ENDO	- Abertura da janela óssea - Apicectomia/ seccionamento de raiz	15 15
	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Odontosecção	32/40
W1	ENDO	- Apicectomia	15
	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador (amálgama grande)	31
	PRÓTESE	- Odontosecção - Remoção de facetas	40 37
W1-O	ENDO	- Apicectomia	15
	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador (amálgama grande)	31
	PRÓTESE	- Odontosecção	40
W1T-O	PERIO	- Raspagem supragengival convencional (sem diamante)	20

Insertos Clirúrgicos

SCP	- Preparação/ perfuração para implante	49
	- Coleta de osso autógeno	45
	- Trefina	47
SCPF	- Preparação/ perfuração para implante (próxima à tecidos moles)	49
	- Coleta de osso autógeno (próxima à tecidos moles)	45
	- Trefina com ação mais delicada	47
SCR7	- Limpeza de alvéolos	46
SI	- Guia para SCP	48
SE1	- Descolamento da membrana sinusal	47

SE9F	- Raspagem e regularização de superfície óssea	45
SE9G	- Raspagem e regularização de superfície óssea	45
SF2	- Perfuração óssea	49
SF11	- Osteotomia e osteotomia	42
SF32	- Osteotomia e osteotomia (área de difícil acesso)	42
SF3 SF38	- Osteotomia e osteotomia	42
	- Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	50
SF32-O	- Osteotomia e Osteotomia na ortogonal (área de difícil acesso)	43
SF38-O	- Osteotomia e Osteotomia na ortogonal (área de difícil acesso)	42
	- Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	49
SF3F	- Osteotomia e osteotomia delicada (próxima à tecidos moles)	44
SF3F-O	- Osteotomia e Osteotomia delicada na ortogonal (área de difícil acesso próxima à tecidos moles)	44
SF3-L (left)	- Osteotomia e osteotomia lateral (áreas de difícil acesso)	43
SF3-R (right)	- Osteotomia e osteotomia lateral (áreas de difícil acesso)	42
SFR3	- Osteotomia e osteotomia	42
SFR4	- Osteotomia e osteotomia	42
	- Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	50
SFR5	- Osteotomia e osteotomia	42
SFR42 SFR43	- Osteotomia e osteotomia	43
SFS3-O	- Raspagem e coleta de osso autógeno	45
SFTV-O	- Periotomia em todos os elementos	49
	- Corticotomia delicada	44
SFTV2-O	- Apicectomia	50
	- Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados/ Abertura de loja cirúrgica	43
SL1	- Osteotomia delicada (próxima à tecidos moles)	44
SL2	- Osteotomia e osteotomia próxima à tecidos moles	44
SL3G	- Raspagem e regularização da superfície óssea	45
SLO-2	- Descolamento da membrana sinusal	47
SLTV-O	- Descolamento de retalho	47
	- Periotomia em molares	49
SR2	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
SR4	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
SR9	- Perfuração óssea/ Abertura de janela óssea	48
SR11	- Desgaste ósseo/ Abertura de janela óssea	45/48
STR23 STR33	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	49
STR1 STR4	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
ST10G	- Limpeza de cavitações ósseas	46



@cvdentus



/cvdentus



CVDentus Diamantes



cvdentus.com.br



Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP
Fone: +55 (12) 3944-1126

*Imagens meramente ilustrativas e cotas aproximadas.